



## **INDICAÇÕES DE USO**

Lentes de contato gelatinosas indicadas para correção visual de miopia, hipermetropia, presbiopia ou astigmatismo.

## **CONTRAINDICAÇÕES (MOTIVOS PARA NÃO USAR LENTES)**

**NÃO UTILIZAR** as lentes de contato quando houver qualquer uma das seguintes condições:

- Inflamação ou infecção aguda ou subaguda da câmara anterior do olho.
- Qualquer doença ocular, ferimento ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras.
- Insuficiência de secreção lacrimal (Síndrome de olhos secos).
- Hipoestesia da córnea (sensibilidade da córnea reduzida)
- Qualquer doença sistêmica que pode afetar o olho ou pode ser exacerbada pela utilização de lentes de contato.
- Reações alérgicas das superfícies oculares ou tecidos ao redor que podem ser induzidos ou piorar devido ao uso de lentes de contato
- Alergia a qualquer um dos componentes das lentes de contato e/ou em Soluções de limpeza de lentes de contato. Estas Soluções podem conter substâncias como mercúrio e timerosal que podem causar alergia.
- Qualquer infecção corneana.

## **ADVERTÊNCIAS**

**PROBLEMAS OCULARES, INCLUINDO ÚLCERAS DE CÓRNEA, PODEM SE DESENVOLVER RAPIDAMENTE E LEVAREM À PERDA DE VISÃO, SE VOCÊ APRESENTAR:**

- Desconforto ocular
- Lacrimejamento excessivo
- Alterações da visão
- Perda da visão
- Vermelhidão nos olhos
- Outros problemas oculares

**VOCÊ DEVE REMOVER SUAS LENTES IMEDIATAMENTE E ENTRAR EM CONTATO COM SEU OFTALMOLOGISTA, SE:**

- O usuário for incapaz de seguir as etapas de cuidado com a lente de contato
- As lentes de uso diário não são indicadas para uso durante o sono. Dormir com lentes de contato potencializa o risco de reações adversas.
- Estudos demonstram que usuários de lentes de contato que são fumantes têm uma maior incidência de reações adversas do que os não fumantes.



## **PRECAUÇÕES**

- Não use se o blister estiver aberto ou danificado.
- Siga cuidadosamente as instruções de manuseio, colocação, remoção, limpeza, uso e descarte prescrita pelo seu oftalmologista.
- Siga as recomendações do cronograma de uso prescritas. Nunca utilizar lentes além do período recomendado pelo oftalmologista. Sempre lavar e enxaguar as mãos antes de manusear as lentes. Não use cosméticos nas lentes de contato. Recomenda-se colocar as lentes de contato antes de usar maquiagem.
- Nunca use pinça ou outras ferramentas para remover as lentes dos recipientes.
- Não use as unhas para manipular suas lentes. Sempre contatar seu oftalmologista sobre o uso das lentes de contato durante atividades esportivas

## **EFEITOS ADVERSOS**

Possíveis problemas que podem ocorrer ao usar lentes de contato:

- Os olhos podem doer, arder e/ou coçar (irritação).
- Redução da sensação de conforto
- Sensação de algo presente nos olhos (corpo estranho, área arranhada).
- Lacrimejamento, secreções oculares incomuns ou vermelhidão dos olhos.
- Redução da acuidade visual
- Visão turva, arco íris ou halos ao redor de objetos, sensibilidade à luz (fotofobia) ou ressecamento ocular.

Se notar alguns dos sintomas, você deve:

- Remover imediatamente as lentes.
- Se o desconforto ou o problema parar, olhe as lentes de perto.

Se as lentes estiverem danificadas de alguma forma, não coloque essas lentes nos olhos novamente.

- Se as lentes estiverem sujas, com um cílio ou corpo estranho, limpe e desinfete com solução apropriada e coloque suas lentes novamente.

Se o problema continuar, remova as lentes e consulte imediatamente o oftalmologista.

## **MODO DE USO – MANUSEIO E COLOCAÇÃO DAS LENTES**

É essencial que você tenha bons métodos de higiene no cuidado e manuseio das lentes. A limpeza é o primeiro e mais importante aspecto de cuidado das lentes de contato:



CooperVision™

## LENTE DE CONTATO OMAFILCON B (PROCLEAR) INSTRUÇÕES DE USO



- Sempre lave suas mãos com sabão neutro e água, enxágue completamente e seque com uma toalha sem fiapos antes de tocar em suas lentes.
- Toque em suas lentes com as pontas dos dedos, jamais utilize as unhas ou materiais que possam danificar as lentes para manusear.
- Abra 1 blíster de cada vez. Os blisteres individuais foram projetados para garantir a esterilidade do produto. **NÃO USE SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DANIFICADA.**

### COLOCAÇÃO DAS LENTES NOS OLHOS

1. Manuseie uma lente de cada vez. Agite o blister e verifique se a lente está flutuando na solução. Retire o lacre laminado, remova as lentes com cuidado.
2. Antes de colocar a lente, certifique-se que não esteja virada na direção oposta. Coloque a lente no seu dedo indicador para verificar o formato.



3. Utilizando o dedo médio, faça deslizar a pálpebra inferior. Com o dedo indicador da outra mão, puxe a pálpebra superior. Coloque a lente. Repita a operação para o outro olho.



### REMOÇÃO DAS LENTES

1. Separe as pálpebras com o dedo médio de cada mão
2. Olhe para cima e com o dedo indicador da outra mão, deslize a lente.
3. Comprima ligeiramente a lente até que a lente se descole e retire-a com o polegar e o indicador. Repita a operação para o outro olho.





## **QUANTIDADES DE HORAS DE USO DIÁRIO**

O programa de uso, ou seja, o tempo de uso das lentes deve obedecer às recomendações do seu oftalmologista.

## **LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESCARTE**

As lentes Proclear (Omafilcon B) são de **DESCARTE MENSAL**, e devem ser limpas e desinfetadas após o uso diário. Os 30 dias devem ser contados **A PARTIR DA ABERTURA** do blister.

Para limpeza de suas lentes:

- Utilize Soluções multiuso indicadas por seu oftalmologista.
- Guarde suas lentes em estojo com Solução multiuso.
- Não utilize água de torneira ou soro fisiológico para a limpeza de suas lentes.

**DESCARTE SUAS LENTES APÓS 30 DIAS** da abertura do blister em recipiente de resíduo comum, mesmo que elas pareçam estar em boas condições.

## **TROCAS**

A CooperVision não garante trocas de lentes devido a manuseio incorreto, troca contra rasgos, contaminações, manchas, picotes de borda, fungos, depósitos proteicos. Para maiores informações sobre a política de troca, entre em contato através dos canais de atendimento descritos abaixo:

### **IMPORTADO POR:**

CooperVision do Brasil Ltda.  
Av. Marques de São Vicente 2800, São Paulo -SP  
SAC: 0800-6009097  
[www.coopervision.com.br](http://www.coopervision.com.br)  
Registro ANVISA: 80130430047  
Responsável Técnico: Carlos Cezar Martins  
CRF/SP: 81534

### **FABRICADO POR:**

COOPERVISION, INC.  
Scottsville, NY 14546, USA

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Quantidade: vide caixa. Armazenar em temperatura de até 45°C.**

**ESTÉRIL. Produto esterilizado a vapor.**

## **CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA**