



INDICAÇÕES DE USO

Lentes de contato gelatinosas indicadas para correção visual de miopia e podem auxiliar na redução da progressão de miopia em crianças e jovens.

CONTRAINDICAÇÕES (MOTIVOS PARA NÃO USAR LENTES)

NÃO UTILIZAR as lentes de contato quando houver qualquer uma das seguintes condições:

- Inflamação ou infecção aguda ou subaguda da câmara anterior do olho.
- Qualquer doença ocular, ferimento ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras.
- Insuficiência de secreção lacrimal (Síndrome de olhos secos).
- Hipoestesia da córnea (sensibilidade da córnea reduzida)
- Qualquer doença sistêmica que pode afetar o olho ou pode ser exacerbada pela utilização de lentes de contato.
- Reações alérgicas das superfícies oculares ou tecidos ao redor que podem ser induzidos ou piorar devido ao uso de lentes de contato
- Alergia a qualquer um dos componentes das lentes de contato.
- Qualquer infecção corneana.

ADVERTÊNCIAS

PROBLEMAS OCULARES, INCLUINDO ÚLCERAS DE CÓRNEA, PODEM SE DESENVOLVER RAPIDAMENTE E LEVAREM À PERDA DE VISÃO, SE VOCÊ APRESENTAR:

- Desconforto ocular
- Lacrimejamento excessivo
- Alterações da visão
- Perda da visão
- Vermelhidão nos olhos
- Outros problemas oculares

VOCÊ DEVE REMOVER SUAS LENTES IMEDIATAMENTE E ENTRAR EM CONTATO COM SEU OFTALMOLOGISTA, SE:

- O usuário for incapaz de seguir as etapas de cuidado com a lente de contato
- As lentes de uso diário não são indicadas para uso durante o sono. Dormir com lentes de contato potencializa o risco de reações adversas.
- Estudos demonstram que usuários de lentes de contato que são fumantes têm uma maior incidência de reações adversas do que os não fumantes.



PRECAUÇÕES

- Não use se o blister estiver aberto ou danificado.
- Siga cuidadosamente as instruções de manuseio, colocação, remoção, limpeza, uso e descarte prescrita pelo seu oftalmologista.
- Siga as recomendações do cronograma de uso prescritas. Nunca utilizar lentes além do período recomendado pelo oftalmologista. Sempre lavar e enxaguar as mãos antes de manusear as lentes. Não use cosméticos nas lentes de contato. Recomenda-se colocar as lentes de contato antes de usar maquiagem.
- Nunca use pinça ou outras ferramentas para remover as lentes dos recipientes.
- Não use as unhas para manipular suas lentes. Sempre contatar seu oftalmologista sobre o uso das lentes de contato durante atividades esportivas

EFEITOS ADVERSOS

Possíveis problemas que podem ocorrer ao usar lentes de contato:

- Os olhos podem doer, arder e/ou coçar (irritação).
- Redução da sensação de conforto
- Sensação de algo presente nos olhos (corpo estranho, área arranhada).
- Lacrimejamento, secreções oculares incomuns ou vermelhidão dos olhos.
- Redução da acuidade visual
- Visão turva, arco íris ou halos ao redor de objetos, sensibilidade à luz (fotofobia) ou ressecamento ocular.

Se notar alguns dos sintomas, você deve:

- Remover imediatamente as lentes.
- Se o desconforto ou o problema parar, olhe as lentes de perto.

Se as lentes estiverem danificadas de alguma forma, não coloque essas lentes nos olhos novamente.

- Se as lentes estiverem sujas, com um cílio ou corpo estranho, limpe e desinfete com solução apropriada e coloque suas lentes novamente.

Se o problema continuar, remova as lentes e consulte imediatamente o oftalmologista.

MODO DE USO – MANUSEIO E COLOCAÇÃO DAS LENTES

É essencial que você tenha bons métodos de higiene no cuidado e manuseio das lentes. A limpeza é o primeiro e mais importante aspecto de cuidado das lentes de contato:



- Sempre lave suas mãos com sabão neutro e água, enxágue completamente e seque com uma toalha sem fiapos antes de tocar em suas lentes.
- Toque em suas lentes com as pontas dos dedos, jamais utilize as unhas ou materiais que possam danificar as lentes para manusear.
- Abra 1 blister de cada vez. Os blisters individuais foram projetados para garantir a esterilidade do produto. **NÃO USE SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DANIFICADA.**

COLOCAÇÃO DAS LENTES NOS OLHOS

1. Manuseie uma lente de cada vez. Agite o blister e verifique se a lente está flutuando na solução. Retire o lacre laminado, remova as lentes com cuidado.
2. Antes de colocar a lente, certifique-se que não esteja virada na direção oposta. Coloque a lente no seu dedo indicador para verificar o formato.



3. Utilizando o dedo médio, faça deslizar a pálpebra inferior. Com o dedo indicador da outra mão, puxe a pálpebra superior. Coloque a lente. Repita a operação para o outro olho.



REMOÇÃO DAS LENTES

1. Separe as pálpebras com o dedo médio de cada mão
2. Olhe para cima e com o dedo indicador da outra mão, deslize a lente.
3. Comprima ligeiramente a lente até que a lente se descole e retire-a com o polegar e o indicador. Repita a operação para o outro olho.





QUANTIDADES DE HORAS DE USO DIÁRIO

O programa de uso, ou seja, o tempo de uso das lentes deve obedecer às recomendações do seu oftalmologista.

LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESCARTE

As lentes MiSight 1 day (Omafilcon A) são de uso único e devem ser **DESCARTADAS DIARIAMENTE** em recipiente de resíduo comum. Em hipótese alguma devem ser limpas ou reutilizadas. **DESCARTAR APÓS O USO.**

TROCAS

A CooperVision não garante trocas de lentes devido a manuseio incorreto, troca contra rasgos, contaminações, manchas, picotes de borda, fungos, depósitos proteicos. Para maiores informações sobre a política de troca, entre em contato através dos canais de atendimento descritos abaixo:

IMPORTADO POR:

CooperVision do Brasil Ltda.
Av. Marques de São Vicente 2800, São Paulo -SP
SAC: 0800-6009097
www.coopervision.com.br
Registro ANVISA: 80130430056
Responsável Técnico: Carlos Cezar Martins
CRF/SP: 81534

FABRICADO POR:

COOPERVISION MANUFACTURING LTD.
Hamble, SO31 4RF – Reino Unido

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Quantidade: vide caixa. Armazenar em temperatura de até 45°C.

ESTÉRIL. Produto esterilizado a vapor.

CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA